


3D röntgeni VAATEVÄLJA mõõtmed esitatakse kujul **d x h** cm (silinder, mille **läbimõõt** on **d** ning **kõrgus** **h**)

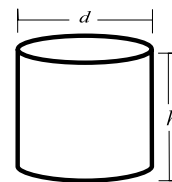

Läänemere Hambakliiniku LASNAMÄE ja MUSTAMÄE KLIINIKUD

Kasutame seadet **Carestream CS 8100 3D**

VAATEVÄLJAD

- **Terve suu** (ülemine ja alumine lõualuu) – **8 x 9** (laspatsientidele mõeldud režiimis **8 x 8**)
NB! Sõltuvalt patsiendi lõualuude suurusest ei pruugi tarkusehambad tervikuna peale jääda!
- **Üks lõug** (ülemine või alumine lõualuu) – **8 x 5**
NB! Sõltuvalt patsiendi lõualuude suurusest ei pruugi tarkusehambad tervikuna peale jääda!
- **Segment** kindla hamba piirkonnast – **5 x 5** (laspatsientidele mõeldud režiimis **4 x 4**)

RESOLUTSIOON – voksli suurus

Standardresolutsioon – Voksli suurus **150 µm**

Võimalik valida **madalamat resolutsiooni**:

- **Kiirskann**: minimeerib hõive aja, et vältida patsiendi liikumist – Voksli suurus **300 µm**
- **Madal doos**: minimeerib hõive röntgenikiirguse doosi – Voksli suurus **400 µm**

Segmendi puhul on võimalik valida ka **kõrgemat resolutsiooni**:

- Voksli suurus **75 µm**

Läänemere Hambakliiniku PELGULINNA kliinik

Kasutame seadet **Carestream CS 8200 3D**

VAATEVÄLJAD

- **Terve suu** (ülemine ja alumine lõualuu) – **8 x 9**; 10 x 10; 12 x 10
- **Üks lõug** (ülemine või alumine lõualuu) – **8 x 5**; 10 x 5; 12 x 5
- **Segment** kindla hamba piirkonnast – 4 x 4; **5 x 5**; 5 x 8
 - Esiletoodud kirjas (**bold**) on toodud standard vaatevälja valik, kui saatekirjas ei ole vaatevälja mõõtmeid numbriliselt täpsustatud.
 - Laspatsientide puhul on soovituslikud väikseimad vaateväljad võimalikust valikust.
 - Vaateväljade 8 x 9 ja 8 x 5 korral sõltuvalt patsiendi lõualuude suurusest ei pruugi tarkusehambad tervikuna peale jääda!

RESOLUTSIOON – voksli suurus

Standardresolutsioon – Voksli suurus **150 µm**

Võimalik valida **madalamat resolutsiooni**:

- **Kiirskann**: minimeerib hõive aja, et vältida patsiendi liikumist – Voksli suurus **300 µm**
- **Madal doos**: minimeerib hõive röntgenikiirguse doosi – Voksli suurus **300 µm**

Segmendi puhul on võimalik valida ka **kõrgemat resolutsiooni**:

- Voksli suurus **75 µm**